

## Jeringa hipodérmica estéril con aguja

Estas jeringas hipodérmicas estériles de un solo uso con aguja están diseñadas para la administración segura de medicamentos y la extracción de fluidos en entornos sanitarios. Fabricadas con materiales de grado médico, garantizan calidad, seguridad y fiabilidad en cada aplicación.



### Información del producto

- Nombre comercial: Jeringa hipodérmica estéril de un solo uso con aguja.
- Uso previsto: Inyecciones hipodérmicas, preparación y administración de medicamentos, extracción de fluidos.
- Materiales principales:
  - Barril y émbolo: Polipropileno (PP) grado médico
  - Pistón: poliisopreno
  - Aguja: Acero inoxidable
- Protector y cubo de aguja: Polipropileno (PP) grado médico
- Propiedades: Aséptico, no tóxico, libre de pirógenos, sin hemólisis
- Vida útil: 5 años

### Partes que componen el dispositivo médico – Composición cualitativa

| Parte del dispositivo  | Material           |
|------------------------|--------------------|
| Barril                 | Polipropileno (PP) |
| Émbolo                 | Polipropileno (PP) |
| Pistón                 | Poliisopreno       |
| Centro (cubo de aguja) | Polipropileno (PP) |
| Tubo de aguja          | Acero inoxidable   |
| Tapa de la aguja       | Polipropileno (PP) |
| Medio de unión         | Resina epoxídica   |

### Normativas

- Dispositivo Médico – Clase IIa: Conforme al Reglamento (UE) 2017/745 (MDR) – Unión Europea
- Normativa nacional (Colombia)
  - Decreto 4725 de 2005, modificado por Decreto 582 de 2017 y Ley 1437 de 2011 – Ministerio de Protección Social de Colombia
  - Resolución 4002 de 2007 – Almacenamiento y acondicionamiento – Ministerio de Protección Social de Colombia
- Normas técnicas internacionales
  - EN ISO 8537: Jeringas estériles de un solo uso con aguja, ISO 13485: Sistema de gestión de calidad del fabricante

## Jeringa hipodérmica estéril con aguja

### Instrucciones de uso

- Producto estéril de un solo uso.
- Se puede utilizar para inyecciones hipodérmicas y aspiraciones de soluciones y/o fluidos en el cuerpo humano.
- Una vez extraído del envase, debe utilizarse lo más rápido posible para evitar la pérdida de esterilidad.
- Realizar técnica de lavado de manos antes del procedimiento.
- Usar guantes de examen o estériles según corresponda.
- Verificar la vigencia del producto y la integridad del empaque antes de abrir.
- Abrir el empaque por un extremo y retirar la jeringa, asegurando que el protector de la aguja esté en su lugar para evitar daños en la punta.
- Ensamblar la aguja a la jeringa, retirar el protector y comprobar la funcionalidad de la jeringa.
- Aplicar alcohol en la superficie donde se introducirá la aguja.
- Introducir la aguja según corresponda para administrar o extraer líquidos.
- Desechar inmediatamente después de su uso en contenedores apropiados para material punzocortante.
- Evitar la exposición a fuentes de calor y al contacto con solventes orgánicos.
- No almacenar al aire libre ni a la luz solar.

### Características

| Referencia                                   | Caja         | Caja Master    |
|----------------------------------------------|--------------|----------------|
| Jeringa 1ml 27G x 1/2" luer slip – luer lock | 100 unidades | 3.200 unidades |
| Jeringa 1ml 30G x 1/2"                       | 100 unidades | 3.200 unidades |
| Jeringa 1ml 31G x 1/2"                       | 100 unidades | 3.200 unidades |
| Jeringa 2ml 21G x 1 1/2"                     | 100 unidades | 3.000 unidades |
| Jeringa 2ml 23G x 1 1/2"                     | 100 unidades | 3.000 unidades |
| Jeringa 2ml 23G x 1"                         | 100 unidades | 3.000 unidades |
| Jeringa 3ml 21G x 1 1/2"                     | 100 unidades | 3.000 unidades |
| Jeringa 5ml 21G x 1 1/2"                     | 100 unidades | 2.400 unidades |
| Jeringa 10ml 21G x 1 1/2"                    | 100 unidades | 1.600 unidades |
| Jeringa 20ml 21G x 1 1/2"                    | 100 unidades | 600 unidades   |
| Jeringa 50ml 21G x 1 1/2"                    | 100 unidades | 400 unidades   |
| Jeringa 60ml Punta Catéter                   | 100 unidades | 400 unidades   |

### Información Logística

- Unidad de consumo: caja de 100 uds / 50 uds / 25 uds / 1 ud (según tamaño)
- Unidad de transporte: cartón master / pallet
- Códigos arancelarios sugeridos: 9018.31 (jeringas con aguja, HS Code internacional)